

Diagnostic immunologique de la tuberculose - QuantiFERON®-TB-Gold Plus



Étiquetez le tube



Ne pas attacher
l'étiquette
sur la marque

Prise de sang

Important: **Remplissez tous les 4 tubes**

jusqu'aux marques = 1 ml, après le remplissage laissez chaque tube à l'aiguille pendant 3 secondes

Avec Butterfly

remplissez d'abord le tuyau avec le vacutainer-tubes et posez ensuite le tube de QuantiFERON

Secouez le tube vivement pendant 5 sec



Ne pas mettre le tube dans le réfrigérateur ou dans le congélateur
choisissez une alternative



Transport vite au ZLM

à 17-27°C

après la prise de sang. L'échantillon doit être incubé au **ZLM** en 16h.

Incubation à l'endroit

dans l'incubateur à 37°C:

- auparavant secouez le tube vivement
- tube debout, couverture en haut
- durée 16-24 h



Option pour expéditeur externes par Swiss Courrier Intercity.

L'échantillon est pris par le Courrier. Annonce si possible la veille ou jusqu'à 09.00 h au plus tard sous le no de tel. 0800 888 888. remise au **ZLM** garantie avant 17.00 h. Coûts au débit du mandant!

Transport au ZLM

- en 72 h
- temp. d'environnement 2°- 27°C

Option pour temps de transport plus longs:

Centrifugation 10 min. à 1'500 – 2'200 g
après incubation à 37°C.
Solidité 8 Semaines à 2-8°C

Réception ZLM

Lundi – Jeudi 08:00 – 17:30 Uhr

Réception ZLM

Lundi – Vendredi 08:00 – 17:30 Uhr
Samedi 08:00 – 11.30 Uhr

Transmission des résultats :

2 x par semaine, plus souvent lors de haute fréquence de demandes

Facturation:

100 points taxe = CHF 100.- (Révision EAL de 1 juillet 2009; 3453.00)

