


Diagnosi immunologica della tubercolosi - **QuantiFERON®-TB-Gold Plus**



Applicare le etichette alle provette

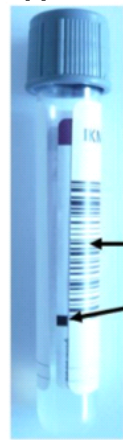

Attenzione: non incollare l'etichetta sopra la linea che segna il livello di riempimento della provetta.

Prelievo sanguigno

Attenzione: é molto importante riempire le quattro provette fino alla linea nera = 1 ml. Non togliere subito la provetta ma lasciarla ancora per 3 sec attaccata all'ago.

Butterfly

riempire prima il tubo con una provetta Vacutainer, poi inserire la provetta Quantiferon

Agitare la provetta in modo energico per 5 secondi



Non conservare le provette in frigo o nel congelatore ma scegliere una di queste modalità d'invio



Trasporto rapido alle ZLM,
temperatura ambiente (17-27°C)
Le provette devono essere incubate
alle ZLM entro 16 ore dal prelievo.

Opzione per clienti esterni :**Swiss Kurier Intercity.**

Il campione è prelevato dal corriere. Sie prega di annunciare al numero telefonico 0800 888 888. il ritiro merce preferibilmente il giorno precedente o al piu tardi entro le 09.00h del giorno stesso

La ditta garantisce la consegna alle **ZLM** entro le 17.00h. I costi sono a carico del committente!

Accettazione ZLM

Lunedì – Giovedì 08:00 – 17:30

Incubazione sul luprelievo :

nell'incubatore a 37°C:

- Mescolare ancora una volta energicamente le provette
- Incubare le provette in verticale con il tappo rivolto verso l'alto
- durata dell'incubazione 16-24 ore



Trasporto alle ZLM

- entro 72 ore
- temperatura 2°- 27°C

Opzione per tempi di trasporto lunghi:

Centrifugare i tubi dopo l'incubazione a 37°C per la durata di 10 min. a 1'500 – 2'200g. I campioni si conservano dopo questo trattamento per 8 settimane ad una temperatura di 2-8°C

Accettazione ZLM

Lunedì – Venerdì 08:00 – 17:30
Sabato 08:00 – 11.30

Emissione del risultato: 2 volte la settimana. In caso di numero elevato di campioni, l'analisi potrà essere eseguita più frequentemente

Tariffa: 100 punti = CHF 100.- (Revisione EAL del 1. luglio 2009; posizione 3453.00)

