


QuantiFERON®-TB Gold Plus

Diese Version des Tuberkulose-spezifischen Lymphozyten-Stimulationstests enthält jetzt vier statt bisher drei Röhrchen. Im Set befinden sich nebst den Kontrollen (grau und violett) zwei Röhrchen mit spezifischen Tuberkulose-Antigenen (gelb und grün). Die Teströhrchen enthalten spezifische Tuberkulose-Antigene. Das grüne (TB1) Röhrchen ist optimiert für die Messung der CD4-Zellantwort, das gelbe (TB2) misst CD4- und CD8-Antworten.

Bei der Blutentnahme bitte folgende Punkte beachten:

- Die Röhrchen füllen sich nur wenig (ca. 1 ml bis zur schwarzen Markierung), unter Umständen nur langsam, bitte lange genug warten.
- Der Füllstand muss 0.8 ml bis 1.2 ml betragen (schwarzer Balken). Ungenügend gefüllte oder überfüllte Röhrchen sind für den Test ungeeignet, bitte neu abnehmen.
- Die Röhrchen nach der Entnahme sofort kippen, damit die Probe nicht gerinnt, vor allem bei schwieriger Entnahme.
- Die Lymphozyten müssen frei herumschwimmen können; geronnene oder teilweise geronnene Proben sind ungeeignet, bitte neu abnehmen.
- Der Test funktioniert mit lebenden Lymphozyten, daher Temperaturextreme vermeiden (kein Kühlschrank, nicht in den Briefkasten stellen) und nicht zentrifugieren.
- Die Röhrchen müssen nach spätestens 16 Stunden im Labor sein. Falls dies nicht möglich ist, bitte mit dem entsprechenden synlab Labor Kontakt aufnehmen.

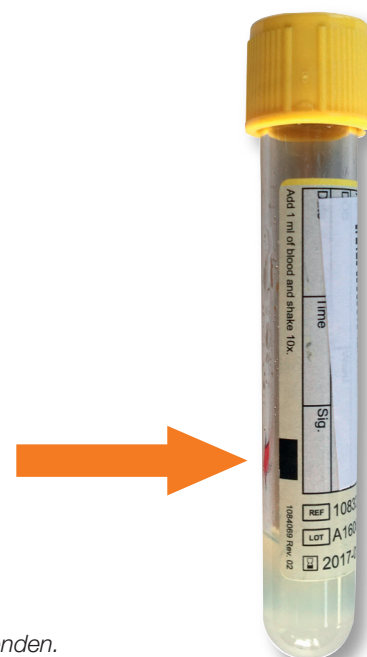

Die bisherigen Sets mit drei Röhrchen können Sie bis zum Verfalldatum problemlos weiter verwenden.