

Nom		Prescripteur	
Prénom		ou étiquette patient sur dernier rapport	
Sexe	F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>		
Né(e) le		Référence patient	
Rue			
NPA / Ville			
Tél. privé		Tél. prof.	
<b>Résultats</b> <input type="checkbox"/> URGENT <input type="checkbox"/> A faxer <input type="checkbox"/> A téléphoner <input type="checkbox"/> Copie patient		<b>Facture</b> <input type="checkbox"/> Patient <input type="checkbox"/> Prescripteur <input type="checkbox"/> Assurance:	
		<b>Prélèvements</b> <input type="checkbox"/> Cabinet médical <input type="checkbox"/> Domicile (Kms .....) Date: ..... Heure: .....	
Copies autre(s) médecin(s)			

Renseignements cliniques / Analyses complémentaires

Centres de prélèvements							
Prél. Reçu	Prél. Reçu	Prél. Reçu	Prél. Reçu	Prél. Reçu	Prél. Reçu	Prél. Reçu	Prél. Reçu
<input type="checkbox"/> Genève Av. de la Roseraie 72 022 704 07 04	<input type="checkbox"/> Genève Rue de Chantepoulet 21 022 704 07 04	<input type="checkbox"/> Chêne-Bourg Rue Jean-Pelletier 4 022 348 64 16	<input type="checkbox"/> Versoix Rte de Suisse 62 022 755 41 04	<input type="checkbox"/> Lausanne Ch. d'Entre-Bois 21 021 641 61 00	<input type="checkbox"/> Lausanne Av. Louis-Ruchonnet 15 021 641 61 00	<input type="checkbox"/> Prilly Rte de Renens 24 021 641 61 00	<input type="checkbox"/> Yverdon Rue d'Orbe 29a 024 423 00 00
<input type="checkbox"/> Genève Rd-Point de Plainpalais 5 022 322 20 40	<input type="checkbox"/> Genève Rue du Nant 4 022 700 27 52	<input type="checkbox"/> Meyrin Rue des Lattes 57 022 785 34 50				<input type="checkbox"/> Fribourg Rue Hans-Geiler 6 026 321 11 23	<input type="checkbox"/> Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 81 032 729 99 70

## INFECTION TUBERCULOSE (QuantiFERON®-TB Gold Plus)

QuantiFERON®-TB Gold

QuantiFERON®-TB Gold Plus se fait sur des tubes spécifiques recouverts d'antigènes de MTB.

Pour chaque prélèvement, 4 tubes sont nécessaires:

- Tube bouchon gris (contrôle négatif)
- Tube bouchon vert (TB1 antigène)
- Tube bouchon jaune (TB2 antigène)
- Tube bouchon violet (contrôle positif)

Prélever 1 ml de sang dans chacun des 4 tubes de QuantiFERON®-TB Gold Plus.

**Le remplissage doit atteindre 0.8 ml à 1.2 ml (marque noire en bas du tube).  
Des tubes insuffisamment remplis ou trop remplis ne conviennent pas pour le test.**

Mélanger délicatement les tubes 10 fois pour s'assurer que la totalité de la surface interne du tube soit recouverte de sang.

Les tubes doivent parvenir au laboratoire dans un délai maximum de 16 heures.

Attention: aucune demande pour ce test ne sera acceptée les week-ends.

5403

+